



Everywhere It Matters.

İnfeksiyon Kontrolünde Mükemmel Denge



ECOLAB HEALTHCARE TÜRKİYE

Ecolab olarak; hasta ve çalışan güvenliğini ve konforunu, aletlerin ve ekipmanların bütünlüğünü koruyarak, enfeksiyonlara sebep olan patojenlerden korunmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm ürün ve hizmetler ile yanınızdayız. Sağlık profesyonelleri olarak, hergün karşılaştığınız zorlukların farkındayız; siz bu zorluklara karşı ürün ve çözümler talep ediyorsunuz, bizler de size optimize edilmiş bu çözümleri geliştiriyor ve hizmetinize sunuyoruz.


Uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarda mikroorganizmalar üzerinde istenen etkinliği sağlarken, çevresel zararları da en alt düzeye indiren ürünler geliştirmeyi hedefledik. Tüm ürünlerimizin çalışan, hasta, ekipman ve çevre güvenliği arasında optimum dengeyi sağlaması için çalıştık. bugün edindiğimiz tecrübe-lerimizle dünya çapında sağlık hizmetleri veren kurumlara, çalışan ve hasta güvenliğini arttırmada, iş gücü ve maliyet verimliliği kazanmada destek olmaya devam ediyoruz.

Ecolab'ın healthcare profesyonelleri ve tıbbi cihaz ve makina üreticileri ile sürdürdüğü küresel işbirliği enfeksiyon kontrolünde lider çözümler geliştirmeyi sağlıyor. Bu çözümler size çalışan ve hastalarınız için ileri düzeyde güvenlik ve kullanılan ekipmanlarınız için de uzun süreli kullanımla birlikte maliyetlerinizi kontrol etme imkanı tanıyor.



GÖRÜNMEZİ GÖRÜNÜR KILIN

EnCompass - Temizlik Performansını Geliştirme Programı

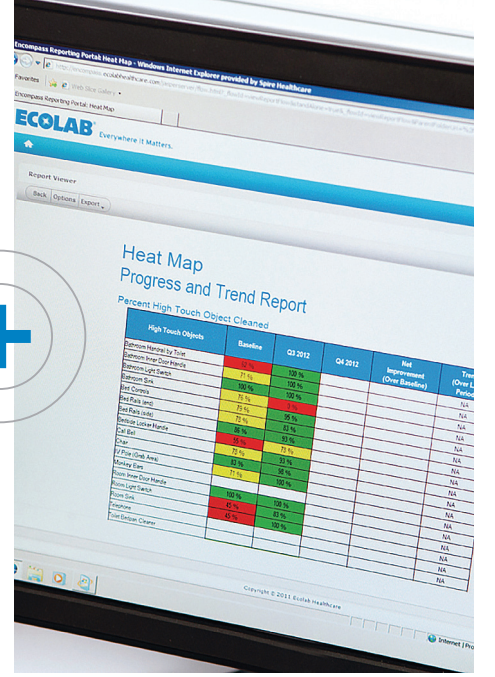

DAZO® FLORESAN İŞARETLEME SİSTEMİ

Yüzey hijyeni uygulamalarını değerlendirmek için, floresan jel ve UV lambadan oluşan sistem objektif veri toplama yöntemi olarak tasarlanmıştır. Böylece, hasta ortamındaki patojenlerin yayılmasını önlemek için zorunlu olan temizlik ve dezenfeksiyon sonuçlarına ulaştığınızı garantiye almanızı sağlar.

- ▲ Sıkça temas edilen yüzeylerin temizlenmesinde verimin nicel geri bildirimini sağlar
- ▲ Doğru eğitim çabalarınızı ve programlara uyumluluğunuzu destekleyecek veri toplamanızı sağlar
- ▲ Kolay uygulanabilen bir sistem
- ▲ Mükemmel malzeme uyumluluğu

VERİ TOPLAMA VE AKTARIM CİHAZI

iPod

Mobil cihazınız, içine Ecolab Yüzey Denetleme uygulaması yüklenmiş şekilde kullanıma hazırdır.

- ▲ Kolay kullanılan veri aktarımı
- ▲ WiFi uyumludur
- ▲ Güvenli veri transferi

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TEMİZLİK RAPORLARI

Aktarılan verilere dayanarak Ecolab sizin için özelleştirilmiş bir rapor oluşturur.

- ▲ Sıkça temas edilen tüm yüzeyler için trend analizi
- ▲ Bazal değerlerle karşılaştırma
- ▲ Veriye dayalı öneriler ve danışmanlık

ENCOMPASS PROGRAMI HAKKINDA
KISA BİR VIDEO İZLEMELİK İÇİN
KAREKODU TARAYIN



EL ve CİLT ANTİSEPTİKLERİ

Skinman® Soft Protect

Tam virüsidal etkili sıvı el antiseptiği
E Vitamini, Gliserin ve Panthenol içerir

Yeni Skinman Soft Protect %89 (w/w) etanol içeriği ile 15 saniyede Noro virüs etkinliğine sahiptir.

- ▲ Skinman® Soft Protect tam virüsidal etkinliği ile hastanenizin tüm el antiseptiği ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir
- ▲ Skinman® Soft Protect EN standartlarına uygun olarak yurtdışı akredite laboratuvarlarda test edilmiş olup, bakteri (Tbc dahil), mantar ve virüslere karşı kısa sürede etkinlik göstermiştir
- ▲ Skinman® Soft Protect içeriğindeki cilt bakım ürünleri sayesinde sık kullanıma uygun olarak geliştirilmiş bir formülasyondur



CİLT DOSTU FORMÜLASYON

Skinman® Soft Protect, uygulama anında ve kalıcı cilt koruma için benzersiz bir formülasyona sahiptir. Sık kullanımda ellerin yumuşak ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.



ETKİNLİK TESTİ	TEMAS SÜRESİ
EN 1500: Hijyenik El Antisepsisi	30 sn
EN 12791: Cerrahi El Antisepsisi	3 dak
DGHM/VAH: Cerrahi El Antisepsisi	90 sn
EN 13727: Bakterisidal	15 sn
EN 13624: Yeastisidal	15 sn
EN 14476: Tam Virüsidal	30 sn
EN 14476: Noro virüs (MNV)	15 sn
EN 14476: Rota virüsü	15 sn
DVV/RKI: Zarflı virüslere karşı etkinlik	15 sn
EN 14348: Tüberkülosidal, mikrobakterisidal	20 sn

- ▲ Aloe vera
- ▲ Panthenol
- ▲ Vitamin E
- ▲ Gliserin



Spirigel complete yenilikçi formülasyonu ile kullanım kolaylığı, cilt uyumu, kısa sürede tam virüsidal etkinlik sağlayarak, yeni nesil jel form alkolü el antiseptiklerinde lider özelliği taşımaktadır.

ETKİNLİK TESTİ	TEMAS SÜRESİ
EN 1500: Hijyenik El Antisepsisi	30 sn
EN 12791: Cerrahi El Antisepsisi	3 dak
EN 14476: Tam Virüsidal	2 dak
EN 14476: Rota Virüs	15 sn
EN 14476: Murine Noro Virüs	15 sn
EN 13727: Bakterisidal	15 sn
EN 13624: Yeastisidal	15 sn
EN 14348: Tüberkülosidal	15 sn
DVV (Vaccinia / BVDV): Zarflı virüs	30 sn

Spirigel® complete

Cilt dostu bileşenlerin mükemmel uyumu

Spirigel® complete içeriğindeki cilt bakım ürünleri sayesinde, sık kullanıma uygun olarak geliştirilmiş bir formülasyondur.

Spirigel® complete geleneksel jel formülasyonlarla karşılaştırılarak, uygulama sırasındaki rahatlığı, kalıntı bırakma, yapışkanlık, cilt uyumu açısından değerlendirilmiş ve sonuçlar Spirigel® complete'nin cilt dostu bir ürün olduğunu göstermiştir.

Spirigel® complete %85 (w/w) etanol içeriği ile sağlık profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan yeni nesil el antiseptiğidir.

Tam Koruma

Spirigel® complete EN 14476 standartlarına göre tam virüsidal etkinliktedir. Bu özelliği ile hastanelerde, hasta odalarından ameliyathanelere kadar geniş bir alanda yüksek koruma seviyesi sağlamaktadır. Spirigel complete EN standartlarına uygun olarak yurtdışı akredite laboratuvarlarda test edilmiş olup, bakteri (Tbc dahil), mantar ve virüslere karşı kısa sürede etkinlik göstermiştir.

Skinman® soft protect ve Spirigel® complete Sağlık Bakanlığı tarafından Hijyenik ve Cerrahi el antiseptiği kullanımıyla (EN 1500 ve EN 12791) Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılmıştır.

BAKIM VE YIKAMA LOSYONLARI

Manisoft®

Bakım ve Temizleme Losyonu



Manisoft®, sabun içermeyen yapısı, cilt ile uyumlu nötr pH değerine sahip olması ile cildin dengesini bozmadan geniş bir alanda, hassas ve normal tüm cilt tipleri için sıklıkla kullanıma uygundur.

Klinikte, medikal alanda, geriatri ve halk sağlığı hizmetlerinde, sağlık personeli, hemşireler ve hastalar için, özellikle cerrahi el dezenfeksiyonundan önce, hijyenik el yıkamada veya hijyenik cilt dezenfeksiyonundan sonra ellerin yıkanması için, ayrıca cildin yıkanması için duş jeli ve köpük banyosu olarak ve ciltteki merhem bakiyelerinin temizlenmesinde kullanımı önerilmektedir.

Manisoft®, ellere uygulanır ve yeterli miktarda su ile köpürtülür. Ayrıca ürün cilde ıslak bir sünger veya yıkama bezi yardımı ile uygulanabilir veya cilt üzerine direk dökülür. Köpük banyoları için, küvet içine su doldurmadan önce ya da sonra dökebilirsiniz.

Silonda®

Nemlendirici Bakım Losyonu



Su içinde yağ emülsiyonu olması, ciltteki nem ve yağ dengesinin yeniden kazanılıp korunmasını sağlar. İçerdiği balmumu, özellikle kuru ve hassas ciltlerde mükemmel nemlendirme oluşturur. Ciltle uyumu,

hoş kokusu, hasta ve bebek cilt bakımında güvenle kullanım olanağı tanır. İçeriğin cilde hızla etki ederek, cilt yüzeyinde kalıntı bırakmadan kolayca emilmesi, geniş kullanım alanı sağlar. Hijyenik ve cerrahi dezenfeksiyonu takiben cilt bakımında, termoterapi, fototerapi, IR ve UV terapileri, tüm vücut banyoları ve özel banyolar akabinde, cilt nemini düzenlemek amaçlı olarak, Silonda® az miktarlarda direk cilde uygulanarak hafifçe ovalanarak yayılır.



DİSPENSERLER

Dermados®



- ▲ El dezenfeksiyonu, temizliği ve bakımı için kullanılan ürünlerin, dozajlamasını sabitleyerek, ekonomik kullanım sağlar
- ▲ Dirsek operasyonlu seviye ayarlayıcı sayesinde, hijyenik kullanıma imkan verir
- ▲ Temizliği kolaydır
- ▲ Alkole dayanıklı malzemeden üretilmiştir

Dermados® L 1 L şişeler için
Dermados® S 500 mL şişeler için

Blue Holder®



Blue Holder ve Blue Holder Hook
Ürün Taşıyıcısı ve Yatak Başı Kancası

- ▲ Kolay kullanım
- ▲ Kolay montaj
- ▲ Kolay ürün değiştirme
- ▲ İsteğe bağlı yatak başına asma imkanı
- ▲ El dezenfeksiyonu, temizliği ve bakım için kullanılan tüm 500 ml formdaki ürünlere uygundur

YER VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI

Ecolab'ın infeksiyon korumasına dengeli yaklaşım prensibi ile yüzey dezenfeksiyonunda geniş bir ürün yelpazesi oluşmuştur. Patentli Ecolab sistemi PerOxyBalance® ve Glucoprotamin® içeren ürünlere ek olarak yeni nesil hızlı etkili hidrojen peroksit içeren ürünleri de sizlerin hizmetinize sunmuştur.

Ecolab ürünleri, ekonomik kullanım ve zaman tasarrufu amaçlı, düşük konsantrasyonlarda ve kısa sürede etkinlik hedeflenerek geliştirilmiştir. Mevcut ürünlerimiz, yüksek risk içeren alanlarda dahi, yüksek dezenfeksiyon güvencesi sağlamaktadır.

Ecolab, kimyasalların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin de bilinci ile çevreye dost, zararlı etkileri en aza indirilmiş ürünler geliştirmede ve sunmada lider bir firmadır. Çevreye karşı olan yükümlülüğümüz ile sunduğumuz tüm ürünler için ekolojik değerlendirme testleri gerçekleştirilmiştir. İlgili test raporları, talebiniz üzerine paylaşılmaktadır. Ecolab yer ve yüzey dezenfektanları, ülkemiz yasal yönetmeliklerine uygun olarak izinlendirilmiştir ve kapsamında oldukları yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaktadır.



YER VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI

Ürün Adı	İçeriği ve Özellikleri	Kullanım Önerileri
----------	------------------------	--------------------

Incidin® foam

Hız Etkili Köpük ve Sprey
Yüzey Dezenfektanı



100 g çözelti içeriği: 20 g İzopropil alkol, 10 g etanol, 0,2 g benzalkonyumklorür, 0,01 g Glucoprotamin®

- Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Birliği (DGHM/VAH) tarafından sertifikalıdır
- Kısa sürede temizlik ve dezenfeksiyon etkisi gösterir
- Aldehid içermez
- Ayarlanabilir başlığı sayesinde köpük ya da sprey formda kullanım olanağı sağlar

- VAH'a göre yüzeylerin dezenfeksiyonu Mekanik etki ile/mekanik etkisiz (bakterisidal, yeastisidal) /kirli ve temiz koşullarda
- VAH'a göre yüzeylerin dezenfeksiyonu mekanik etkisiz (tüberkülosidal)/ kirli ve temiz koşullarda
- EN 13727 bakterisidal
- EN 13624 yeastisidal
- EN 14348 tüberkülosidal
- RKI 01/2004 önerilerine göre HIV, HBV, HCV dahil zarflı virüslere karşı etkinlik
- Papova
- Rota
- Acinetobacter baumannii

Incidin® Pro

Aldehit içermeyen
Konsantre Yüzey
Dezenfektanı



100 g ürün içeriği: 10.0 g Fenoksietanol, 8.0 g Bis-(3-aminopropil) dodecilaamin, 7.5 g Alkildimetil benzilamonyum klorür

- Smart-Balanced formülasyonu ile Incidin® Pro, yüzeylerde temizlik ve dezenfeksiyonu tek adımda gerçekleştirir
- Hastanelerde sıkça karşılaşılan tüm yüzey türleri kullanımına uygundur. Aldehit, parfüm ve boya içermez
- Konsantre ürünü uygun kalitede su ile belirtilen konsantrasyona sulandırınız. Yüzeyin tamamını yeterli miktarda solüsyon ile ıslatınız ve kurumaya bırakınız. Ürün durulama gerektirmez

- DGHM (Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Kuruluşu) 2011 metoduna göre mekanik etkili yüzey dezenfeksiyonu (bakterisidal, yeastisidal) Kirli ve temiz koşullarda
- EN 13727 bakterisidal 0,25%
- EN 13624 yeastisidal 0,25%
- EN 14348 tüberkülosidal ve mikobakterisidal 1.5%
- RKI 01/2004 önerilerine göre zarflı virüsler (HIV, HBV, HCV dahil) 0,25%
- Adeno 1.5%
- Poliovirüs 1.5%
- EN 14476 Noro virüs 1.5%

Medicarine®

Klor Tablet



Sodyumdikloroisosiyanüratdihidrat % 99 2.72 g ağırlığındaki her bir tablet, 1,5 g aktif klor içerir

- Tüm yıkanabilir yüzeylerin dezenfeksiyonu için uygundur
- İçeriğindeki klor ile kısa sürede kalıcı etkinlik sağlamaktadır

- Organik maddelerle kirlenmemiş yıkanabilir yüzeylerin ve ekipmanların dezenfeksiyonu (bakterisidal, virüsidal, fungusidal); 1,5 lt suya 1 tablet = 1000 ppm aktif klor
- Organik maddelerle kirlenmemiş yıkanabilir yüzeylerin ve ekipmanların dezenfeksiyonu (bakterisidal, tüberkülosidal, virüsidal, fungusidal); 1,5 lt suya 2 tablet = 2000 ppm aktif klor
- Organik maddelerin bulaştığı yıkanabilir yüzeylerin ve ekipmanların dezenfeksiyonu (bakterisidal, tüberkülosidal, virüsidal, fungusidal); 1,5 lt suya 6 tablet = 6000 ppm aktif klor

Incidin® active

Tüm Yüzeyler için
Sporisidal Dezenfeksiyon
ve Temizlik



EN 13727 Bakterisidal/EN 13624 Mayalara karşı etkinlik	1,0%	10g/L
EN 14348 Tüberkülosidal etkinlik	1,0%	10g/L
EN 13704 Sporisidal etkinlik	2,0%	20g/L
EN 14476 Virüsidal etkinlik	2,0%	20g/L
DGHM 2001 önerilerine göre mekanik etkili yüzey temizliğinde	1,0%	10g/L

%2 konsantrasyon çözelti içeriği:

>1000 ppm perasetik asit %2 konsantrasyonda çözelti hazırlamak için 160 g ürünü 8 lt su içerisine boşaltınız. 15 dak süresince etkin maddenin oluşması için zaman zaman karıştırarak bekleyiniz. Etkin içerik olarak perasetik asit ürün su ile birleştiğinde oluşur. Uygun prosedürü kullanarak yüzeyleri oluşan çözelti ile tamamen ıslatarak siliniz.

Eğer çözelti organik maddeler ile kirlenmemişse, etkin madde konsantrasyonu bir çalışma günü süresince 1000 ppm olarak kalır.

KULLANIMA HAZIR MENDİLLER

Ürün Adı	İçeriği ve Özellikleri	Kullanım Önerileri
Incidin® Oxywipe S Tıbbi Cihazlar ve Yüzeyler için Hızlı Etkili, Sporoidal Kullanıma Hazır Dezenfektanlı Mendil	100 g ürün içeriği: 1.5 g Hidrojen peroksit - Hi-speed H₂O₂TM / Hızlı etkili hidrojen peroksit - EN 16615 ile uyumlu - Güvenli kullanım, mükemmel malzeme uyumluluğu - Tıbbi, cihaz ve yüzeyler için sporisidal etkinliğe sahip dezenfektanlı mendil - Yüzeyin tamamının silinmesini ve temas süresi boyunca ıslak kalmasını sağlar. Kurumasına izin veriniz. Durulama yapmayınız - Temizlik ve dezenfeksiyonu bir arada sunmaktadır	- VAH 2015 metoduna göre (EN 16615 dahil) yüzey dezenfeksiyonu temiz ve kirli koşullarda - EN 13727 Bakterisidal - EN 13624 Yeastisidal / Fungisidal - EN 14348 Tüberkülosidal / Mikobakterisidal - Adeno* Polyoma SV40* - EN 14476 Virüsidal (Adeno&Nöro virüs dahil) - EN 13704 Sporisidal Kullanımı: Tek bir dezenfektanlı mendili alınız. Kullanım sonrası paketin kapağını kapatınız. Yüzeyin tamamının silinmesini ve temas süresi boyunca ıslak kalmasını sağlayınız
Incidin® Oxywipe Tıbbi Cihazlar ve Yüzeyler için Hızlı Etkili, Kullanıma Hazır Dezenfektanlı Mendil	100 g ürün içeriği: 1.0 g Hidrojen peroksit - Hi-speed H₂O₂TM / Hızlı etkili hidrojen peroksit - EN 16615 ile uyumlu - Güvenli kullanım, mükemmel malzeme uyumluluğu - Tıbbi, cihaz ve yüzeyler için dezenfektanlı mendil - Temizlik ve dezenfeksiyonu bir arada sunmaktadır	- VAH 2015 metoduna göre (EN 16615 dahil) yüzey dezenfeksiyonu temiz ve kirli koşullarda - EN 13727 Bakterisidal - EN 13624 Yeastisidal / Fungisidal - EN 14348 Tüberkülosidal / Mikobakterisidal - Adeno- Polyoma SV40- Rota - EN 14476 Virüsidal (Adeno&Nöro virüs dahil) Kullanımı: Tek bir dezenfektanlı mendili alınız. Kullanım sonrası paketin kapağını kapatınız. Yüzeyin tamamının silinmesini ve temas süresi boyunca ıslak kalmasını sağlayınız
Sani-Cloth® Active Alkol İçermeyen Mendil	Mendile emdirilmiş 100 g çözelti içeriği: 0.45 g Didesildimetilamonyum klorür - Alkole hassas malzemelerle yüksek geçimlilik göstermektedir - Temizlik ve dezenfeksiyonu bir arada sunmaktadır	- DGHM 2001'e göre mekanik etkili dezenfeksiyon (bakteri, maya; temiz ve kirli koşullar) - EN 13727 bakterisidal etkinlik - EN 13624 yeastisidal etkinlik - EN 13624 fungusidal etkinlik - EN 14348 tüberkülosidsidal etkinlik - RKI 01/2004 önerilerine göre zarflı virüslere karşı etki (HBV, HCV, HIV) - Norovirüs etkinliği (murine noro virüsle test edilmiştir) - RKI 01/2004'e göre virüsidal etkinlik - EN 14476 virüsidal etkinlik (temiz koşullar)
Incides® N Hızlı Etkili Alkollü Mendil	Mendile emdirilmiş 100 g çözelti içeriği: 35 g 2-propanol (izopropanol) 25 g 1-propanol (n-propanol) - Alkol içeriği ile hızlı ve geniş etkinlik spektrumuna sahiptir. - Kalıntı bırakmayan yapısı ile alkole dayanıklı tüm cihaz yüzeylerinde, güvenli kullanım olanağı sağlar.	- VAH'a göre mekanik etkili dezenfeksiyon (tüberkülosidal) temiz ve kirli koşullarda - DGHM 2001'e göre hızlı dezenfeksiyon (tüberkülosidal) temiz koşullarda - RKI 01/2004'e göre virüsidal etkinlik (HBV, HCV, HIV) - Adenovirüs - Papovavirüs - Rotavirüs

OXY ETKİSİ İLE TANIŞMA ZAMANI

Incidin® Oxyfoam S ve Incidin® Oxyfoam

Hi-speed H₂O₂™ içeren kullanıma hazır temizlik yapabilen dezenfektanlar

Incidin Oxyfoam S ve Incidin Oxyfoam ürünlerinin yenilikçi formülasyonları, geniş etkinlik spektrumuna sahip patentli* hidrojen peroksit çözümü sunar.

Incidin Oxyfoam S ve Incidin Oxyfoam geniş bir yelpazede bakteri ve virüslere karşı etkindir. Hızlı bir şekilde buharlaşma özelliği ile yüzeyde etken madde kalıntısı oluşmamaktadır.

* Avrupa Patenti EP1987121

- ▲ Hi-speed H₂O₂™ / Hızlı etkili hidrojen peroksit
- ▲ EN 16615 ile uyumlu
Güvenli kullanım
- ▲ Mükemmel malzeme uyumluluğu
- ▲ Tıbbi yüzeyler için sporisidal ve virüsidal etkinliğe sahip kullanıma hazır dezenfektanlar

Incidin® Oxyfoam S

Tıbbi cihazlar ve yüzeyler için hızlı etkili, kullanıma hazır sporisidal yüzey dezenfektanı ve temizleyici köpük sprey



100 g ürün içeriği 1,5 g Hidrojen peroksit

- ▲ Hi-speed H₂O₂™ / Hızlı etkili hidrojen peroksit
- ▲ Tıbbi cihaz ve yüzeyler için sporisidal etkinliğe sahip kullanıma hazır dezenfektan
- ▲ EN 16615 ile uyumlu
- ▲ Güvenli kullanım, mükemmel malzeme uyumluluğu

Ürünü yüzeye 30 cm mesafeden püskürterek veya temiz bir beze uygulayarak kullanınız. Yüzeyin tamamının silinmesini ve temas süresi boyunca ıslak kalmasını sağlayınız. Kurumasına izin veriniz. Durulama yapmayınız.

- ▲ VAH 2015 metoduna göre (EN 16615 dahil) yüzey dezenfeksiyonu kirli koşullarda; Bakterisidal, Yeastisidal, Fungusidal : 5 dak
Mikobakterisidal : 15 dak
- ▲ Temiz ve Kirli koşullarda; Bakterisidal (EN 13727), Yeastisidal (13624): 1 dak
Fungusidal (EN 13624) : 5 dak
Tüberkülosidal, Mikobakterisidal (EN14348): 5 dak
Tam virüsidal etkinlik(EN 14476); Temiz koşullarda : 2 dak
Kirli koşullarda : 30 dak
- ▲ RKI 01/2004 önerilerine göre zarflı virüslere karşı etkinlik (HIV, HBV, HCV dahil) : 15 sn
Adeno, Polyoma SV40 : 30 sn
- ▲ Clostridium difficile (EN 13704) : 3 dak
Sporisidal (EN 13704) : 30 dak

Incidin® Oxyfoam

Tıbbi cihazlar ve yüzeyler için hızlı etkili, kullanıma hazır yüzey dezenfektanı ve temizleyici köpük sprey



100 g ürün içeriği 1,5 g Hidrojen peroksit

- ▲ Hi-speed H₂O₂™ / Hızlı etkili hidrojen peroksit
- ▲ EN 16615 ile uyumlu
- ▲ Güvenli kullanım, mükemmel malzeme uyumluluğu
- ▲ Tıbbi cihaz ve yüzeyler için kullanıma hazır dezenfektan

Ürünü yüzeye 30 cm mesafeden püskürterek veya temiz bir beze uygulayarak kullanınız. Yüzeyin tamamının silinmesini ve temas süresi boyunca ıslak kalmasını sağlayınız. Kurumasına izin veriniz. Durulama yapmayınız.

- ▲ VAH 2015 metoduna göre (EN 16615 dahil) yüzey dezenfeksiyonu kirli koşullarda; Bakterisidal, Yeastisidal : 5 dak
Fungusidal, Mikobakterisidal : 15 dak
- ▲ Temiz ve Kirli koşullarda; Bakterisidal (EN 13727) : 15 sn
Yeastisidal (13624) : 1 dak
Fungusidal (EN 13624): Tüberkülosidal, Mikobakterisidal (EN14348) : 5 dak
Adeno (EN 14476) : 30 sn
Noro (EN 14476) : 15 dak
- ▲ RKI 01/2004 önerilerine göre zarflı virüslere karşı etkinlik (HIV, HBV, HCV dahil) : 15 sn
Adeno : 1 dak
Polyoma SV40, Rota : 30 sn

TIBBİ CİHAZLARIN YENİDEN KULLANIMA HAZIRLANMASI


Ecolab, tıbbi aletlerinizin yeniden kullanıma hazırlanması sürecinin manuel ya da otomatik yıkayıcılarda gelişen her aşamasına uygun ürünler sunmaktadır. Tescilli etkin maddelerimiz PerOxyBalance® ve Glucoprotamin® içeren ürünlerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimiz;

Sahip oldukları yüksek malzeme uyumluluğu ile tıbbi ekipmanlarınızın uzun süreli ve güvenle kullanımına imkan tanır, kurumunuz maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur

Kısa süreli temas, geniş etkinlik ve kolay dozajlama ve hazırlama özellikleri, mükemmel dezenfeksiyon ve temizlik etkisi ile birlikte hasta ve personeliniz için de güvenlik sağlar, iş gücünden tasarruf elde etmenize olanak tanır

Çevreye uyumlu ve doğada parçalanabilir formülasyonları ile kullanıcı ve çevre güvenliği konularında yasal gerekliliklerinizi uygulamanızda yardımcı olur

Ecolab tıbbi cihaz dezenfektanlarının, ülkemiz yasal yönetmeliklerine uygun olarak bildirimleri yapılmıştır ve kapsamında oldukları yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaktadırlar

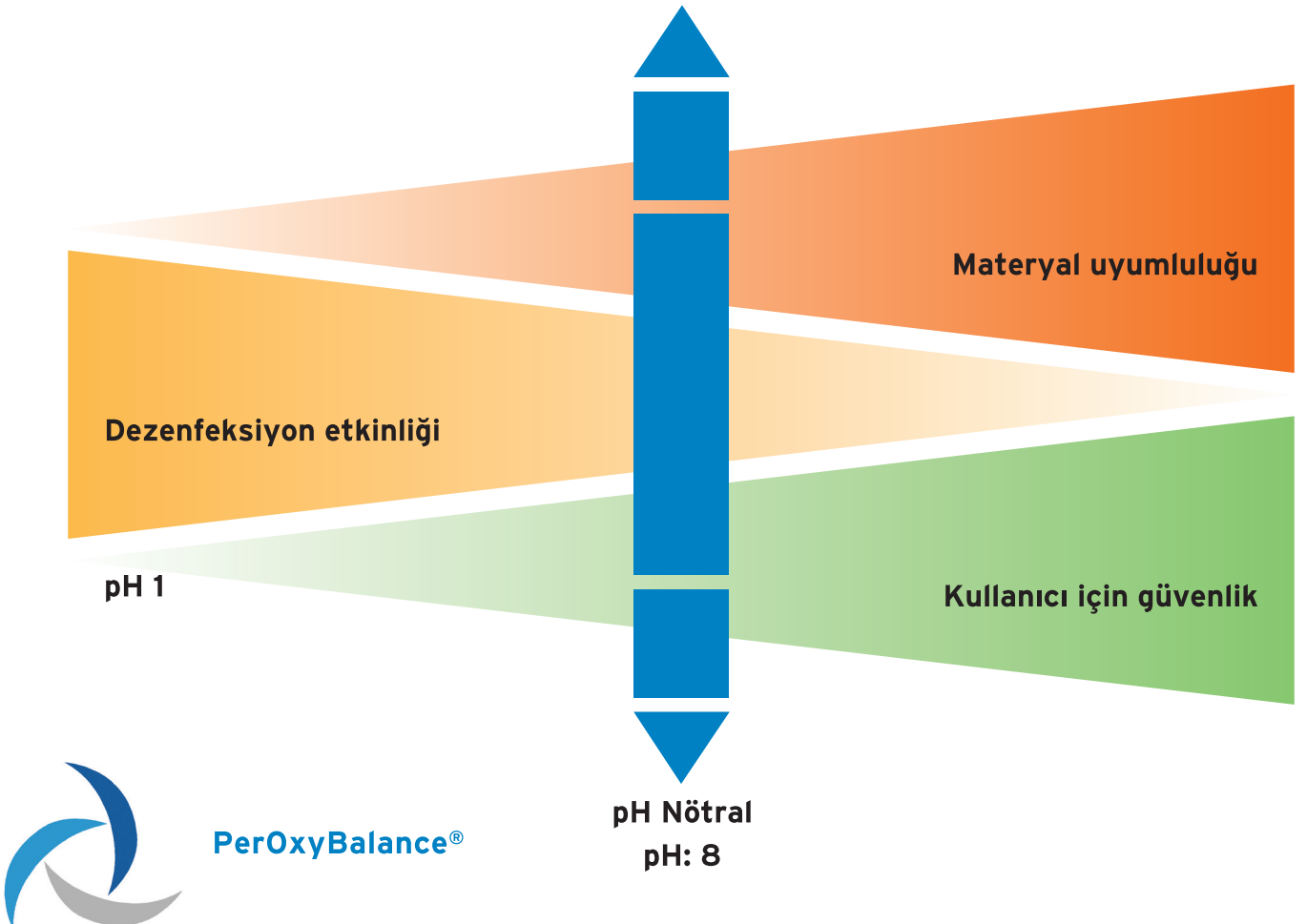

MANUEL ALET DEZENFEKTANLARI

Ürün Adı	İçeriği ve Özellikleri	Kullanım Önerileri
----------	------------------------	--------------------

Combipack Sekusept® Easy

Perasetik asit Hidrojen peroksit kombinasyonu
Yüksek seviyeli dezenfektan




- ▲ Hazırlanma kolaylığı, hızlı mikrobiyosidal etkinliği, köpük içermeyen yapısı ile önceden temizlenmiş tıbbi aletleri ve bükülebilir endoskopların manuel ve yarı otomatik makinalarda yüksek seviyeli dezenfeksiyonu için uygundur
- ▲ Endoskop üreticileri tarafından onaylanmıştır
- ▲ Pirinç ve bakır malzemeden yapılmış aletler için uygun değildir

- ▲ EN 13727 Bakterisidal 1 dak
- ▲ EN 13624 Fungisidal 5 dak
- ▲ EN 14476 Virüsidal 15 dak
- ▲ EN 14348 Tüberkülosidal 5 dak
- ▲ HIRL Sporisidal 5 dak

Bir şişe Sekusept® Easy 450 ml dezenfektanını 5-6 L suya ekleyiniz ve karıştırınız. Bir şişe Sekusept® Easy 420 ml Aktivatörü çözeltiye ekleyiniz ve karıştırınız. Hazırladığınız çözeltiyi toplam 10 litreye tamamlayınız. Sekusept® Easy çözeltisi derhal kullanıma hazırdır. Dezenfekte edilecek aletleri suya tamamen daldırınız. İlgili temas süresinden sonra aletleri çıkararak en azından içilebilir kalitede bir su ile durulayınız.

Çözeltiyi hergün yeniden hazırlayınız.

Ürün etkinliğini Ecolab stripleri ile kontrol ediniz

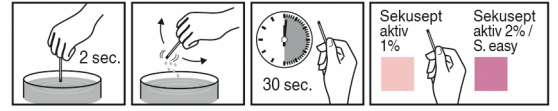

Sekusept® aktif


Yüksek seviyeli tıbbi cihaz dezenfektanı



- ▲ Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Birliği (DGHM/VAH) tarafından sertifikalıdır
- ▲ Yüksek materyal uyumluluğu (bakır ve pirinç hariç) ve temizleme gücü gösterir
- ▲ Endoskop üreticileri tarafından onaylanmıştır
- ▲ DGHM/VAH'a göre (temiz ve kirli koşullarda) bakterisidal ve yeastisidal EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 2%/5 dak
- ▲ DGHM önerilerine göre tüberkülosidal etki EN 14348, EN 14563 (temiz ve kirli koşullarda) 2%/5 dak
- ▲ Virüsidal etki EN 14476 2%/10 dak
- ▲ B. Subtilis (sporisidal) EN 13704 2%/15 dak

%2 konsantrasyonda ürün hazırlamak için 1 litre suya 20 g. ürünü ekleyiniz. 15 dak. süresince aralıklarla karıştırarak tozun çözünmesini sağlayınız. Etken madde olan perasetik asit tozun su ile birleşiminde oluşmaktadır. Kullanıma hazır hale gelen %2 konsantrasyondaki çözelti <1000ppm perasetik asit içermektedir. Dezenfekte edilecek aletleri suya tamamen daldırınız. İlgili temas süresinden sonra aletleri çıkararak en azından içilebilir kalitede bir su ile durulayınız. Çözeltiyi her gün yeniden hazırlayınız.

Ürün etkinliğini Ecolab stripleri ile kontrol ediniz

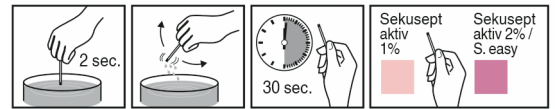

Sekusept® plus

Optimize edilmiş içerikli temizlik ve dezenfeksiyon çözeltisi



- ▲ Tıbbi alet ve endoskop dezenfeksiyonunda patentli bir etken madde Glucoprotamin® içerir. Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Birliği (DGHM/VAH) tarafından sertifikalıdır
- ▲ Etkin maddelerin pozitif uyumu yüksek temizleme gücü sağlar
- ▲ Olympus tarafından onaylanmıştır
- ▲ Silikon, bakır ve pirinç malzemeler için uygun değildir

Çözeltiyi hazırlarken daima soğuk su (<40°) kullanınız. Aletleri kullandıktan sonra hazırladığınız suya tamamen daldırınız. İlgili temas süresinden sonra aletleri çıkararak en azından içilebilir kalitede bir su ile durulayınız. Kullanılan çözeltiyi her gün yeniden hazırlayınız. Kullanılmamış çözelti kapalı bir kaptan 14 gün süresince saklanabilir.

- ▲ DGHM/VAH'a göre alet dezenfeksiyonu (temiz ve kirli koşullarda) 2,5%/30 dak, 4%/15 dak
- ▲ DGHM/VAH'a göre tüberkülosidal etki 1,5%/60 dak
- ▲ DGHM'e göre ultrasonik banyoda alet dezenfeksiyonu 3%/5 dak
- ▲ RKL önerilerine göre epidemi durumunda alet dezenfeksiyonu (bakteri ve mikobakteriler dahil) 1,5%/4 saat
- ▲ RKL önerilerine göre zarflı virüslere etki (HIV, HBV, HCV) 1%/15 dak
- ▲ Adenovirüs, Papovavirüs 2%/60 dak

MANUEL ALET DEZENFEKTANLARI

Ürün Adı	İçeriği ve Özellikleri	Kullanım Önerileri
Sekusept®pulver classic Tüm medikal cihaz ve yüzeyler için dezenfektan	- Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Birliği (DGHM/VAH) tarafından sertifikalıdır - Tüm malzemelerle uyumludur. Bükülebilir endoskoplar için uygun değildir - Ultrasonik yıkama banyolarına uygundur %2 konsantrasyonda ürün hazırlamak için 1 Litre suya 20 g. ürünü ekleyiniz ve karıştırınız. 15 dak süresince etkin maddenin aktivasyonunu bekleyiniz. Etkin madde olan perasetik asit tozun su ile birleşiminde oluşmaktadır. Kullanıma hazır hale gelen %2 konsantrasyondaki çözelti 600ppm perasetik asit içermektedir. Dezenfekte edilecek aletleri suya tamamen daldırınız. İlgili temas süresinden sonra aletleri çıkararak en azından içilebilir kalitede bir su ile durulayınız. Çözeltiyi her gün yeniden hazırlayınız	- VAH'a göre alet dezenfeksiyonu (temiz ve kirli koşullarda) 2%/60 dak, 4%/15 dak - Ultrasonik banyolarda alet dezenfeksiyonu 2%/15 dak - Küvet dezenfeksiyonu 2%/2 dak - RKI önerilerine göre zarflı virüslere etki (HIV, HBC, HCV) 2%/15 dak - Adenovirüs 2%/15 dak - Papovavirüs 2%/5 dak - Rotavirüs 1%/60 dak - VAH'a göre yüzey dezenfeksiyonu (temiz koşullarda) 1,5%/60 dak - VAH'a göre yüzey dezenfeksiyonu (kirli koşullarda) 2%/60 dak

Sekudrill®



100 g çözelti içeriği: 50 g propilen glikol, 5 g potasyum hidroksit non iyonik yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri.	- VAH'a göre alet dezenfeksiyonu (temiz ve kirli koşullarda) bakterisidal ve yeastisidal 5 dak - RKI önerilerine göre virüsidal etkinlik 15 dak - Adenovirüs, Papovavirüs 5 dak
- Diş Hekimliğinde kullanılan döner başlıklı aletler için özel olarak geliştirilmiş formülasyon. - Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Birliği (DGHM/VAH) tarafından sertifikalıdır. - Kullanıma hazır form. - Kısa temas süresinde temizlik ve dezenfeksiyon etkisi - Ultrasonik yıkama banyolarına uygun.	

Sağlık Hizmeti veren diğer kurumlarda olduğu gibi Ecolab, Diş Hekimliği alanında da sizlerin ihtiyacı olan ürünler ve sistemler sunmaktadır. Diş Hekimliği alanındaki dezenfeksiyon ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tüm ürünlerimizle ilgili bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ürün	Görev	Kullanım Alanı	Form	İçerik				Etkinlik				
				Gluco-Protamin®	PerOxy-balance®	Perasetik asit	Alkali	Bakteri	Mantar	Virüs	Spor	Tbc
Sekusept®easy	D	End+ Cer. Alet	Kons		■	■		■	■	■	■	■
Sekusept®aktiv	T+D	End+ Cer. Alet	Kons		■	■		■	■	■	■	■
Sekusept®pulver classic	T+D	Cer. Alet	Kons		■	■		■	■	■		
Sekusept®plus	T+D	End+ Cer. Alet	Kons	■				■	■	■		■
Sekudrill®	T+D	DH	KH				■	■	■	■		

T: Temizlik D: Dezenfeksiyon Kons: Konsantre KH: Kullanıma Hazır End: Endoskop Cer. Alet: Cerrahi Alet DH: Diş Hekimliği

TEMİZLEME SOLÜSYONLARI

Sekusept® multienzyme

Çoklu enzimatik solüsyon



- ▲ Proteaz, Amilaz, Lipaz içerir
- ▲ Yüksek temizleme gücü gösterir
- ▲ Köpük oluşturmaz
- ▲ Ultrasonik banyolar için uygundur
- ▲ Kirlilik tipi düzeyine bağlı olarak 0,3% - %2 Sekusept®Multienzyme'i (örn. 1L suya 3-20 ml eklenerek) temiz musluk suyu ile seyreltiniz
- ▲ Alet üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak görünür kirliliği temizlenmiş aletleri 5-15 dakika süreyle daldırınız
- ▲ Ultrasonik banyoda kullanılıyor ise, sonifikasyon süresince banyo kapağını kapalı tutunuz.
- ▲ Çıkarınca içilebilir kalitede bir su ile çalkalayınız
- ▲ Bir sonraki aşamada kullanılacak dezenfeksiyon çözeltisinin seyrelmesini önlemek amacı ile endoskopun dış yüzeyini ve tüm kanallarını kurutunuz

Seku®Zyme

Enzim içerikli ön
temizleme solüsyonu



- ▲ İçeriğindeki enzim ile üstün temizleme gücü gösterir
- ▲ Kirlilik tipi düzeyine bağlı olarak 0,5% - 2% Seku®Zyme'i (örn. 1L suya 5-20 ml eklenerek) temiz musluk suyu ile seyreltiniz
- ▲ Alet üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak aletleri 5-15 dakika süre ile daldırınız
- ▲ Tüm yüzeylere solüsyonun temas ettiğinden emin olunuz
- ▲ Gereklik durumunda mekanik hareketle temizleme işlemini destekleyiniz
- ▲ Çıkarınca içilebilir kalitede bir su ile çalkalayınız
- ▲ Son olarak bir sonraki aşamada kullanılacak dezenfeksiyon çözeltisinin seyrelmesini önlemek amacı ile endoskopun dış yüzeyini ve tüm kanallarını kurutunuz

Sekusept® Pure Clean

Endoskop ve cerrahi aletlerin
manuel temizliği için
temizleme solüsyonu



- ▲ Bükülebilir endoskoplar dahil tıbbi cihazların manuel temizliği için uygundur
- ▲ Hızlı etkilidir
- ▲ Derinlemesine temizlik sağlar
- ▲ Düşük konsantrasyonda kullanımı ile ekonomiktir
- ▲ Sekusept®Pure Clean, kombinasyon halindeki kimyasal içeriği sayesinde, tıbbi aletlerde sıklıkla karşılaşılan kirlerin (örn. kan, organik atık vb.) hızlı ve etkin temizlenmesine olanak sağlar
- ▲ Kirlilik türüne ve derecesine göre, 0,3% (3 ml/L) - 1% (10 ml/L) konsantrasyonda temiz musluk suyu ile bir çözelti hazırlayınız
- ▲ Temizlenecek medikal aletleri tüm yüzeylerini ıslatacak şekilde süresince solüsyona daldırınız.
- ▲ Aletleri üretici talimatlarına uygun bir şekilde gerekiyorsa mekanik etki (fırçalama, silme vb.) uygulayarak temizleyiniz
- ▲ Ultrasonik banyoda kullanımında, sonifikasyon esnasında kapağını kapalı tutunuz
- ▲ En azından içilebilir kalitede bir su ile durulayınız ve aletlerin dış yüzeylerini ve iç kanallarını kurulayınız

SEKUSEPT ALET KÜVETLERİ

- ▲ Özel olarak kapağı ve iç sepeti ile manuel kullanım için dizayn edilmişlerdir.
- ▲ Doğru dilüsyon sağlamaya yardımcı olarak ürünün güvenle kullanılmasına olanak tanırırlar.



2L Alet Küveti
Ölçüleri(mm): 325x176x100



10L Alet Küveti
Ölçüleri(mm): 530x325x100



8L Alet Küveti
Ölçüleri(mm): 354x355x200



30L Alet Küveti
Ölçüleri(mm): 575x360x210
* Su boşaltma musluğu mevcuttur



SOLIDSAFE™ SYSTEM

DEVİRİM YARATAN FORMAT

80 L sıvı ürüne eşdeğer 4 kg'lık kapsül yüksek derecede konsantredir; depolama ve kullanım açısından büyük kolaylık sağlar:

- ▲ Daha hafif
- ▲ Daha az depolama alanı
- ▲ Daha az atık

YENİLİKÇİ SİSTEM

Katı ürünün kapalı bir dispenser ile kullanılması, bidonlardan akma ve dökülme riskini ortadan kaldırmaktadır. Yenilikçi SolidSafe System hortum ve pompaların değiştirilmesi esnasında oluşan kirliliği ortadan kaldırır.

Uygun dispenser için kodlanmış kapsüllerin kullanımı, kimyasalların yanlış kullanılmasını önler.



MetalClean

with SOLIDSAFE™ technology

Prion inaktivasyonu sağlayan hafif alkali konsantre katı deterjan (Tıbbi Cihaz Sınıf IIb)

MetalClean, cerrahi aletlerin otomatik temizliğinde devrim yapan eşsiz SolidSafe System'in parçasıdır.

Sağladığı güvenlik ve verimlilik faydalarının yanı sıra mükemmel temizlik performansına sahiptir.

- ▲ Temizlik ortamında güvenlik standartlarını geliştiren yenilikçi format
- ▲ Eşsiz formülasyon mükemmel performansı ile güvenilir temizlik sonuçları sağlar
- ▲ Çevreye karşı sorumlu

MÜKEMMEL TEMİZLİK PERFORMANSI

Aktif alkalinite, kompleksleştirici ajanlar ve köpüğü azaltılmış formülasyonu ile güvenilir temizlik sonuçları ile mükemmel temizlik performansı sağlar. İyi malzeme uyumluluğu ile değerli aletlerinize yeniden kullanıma hazırlama sürecinde maksimum koruma sağlar.

KANITLANMIŞ ETKİNLİK

MetalClean, Fransız prion etkinlik standardı DGS/R13/2011/449'a göre prionlara kanıtlanmış etkinliğe sahiptir. Tam prion inaktivasyonu fl 5.5 RF (log10).

ÇEVREYE KARŞI SORUMLU

MetalClean Solid, fosfat, EDTA ve NTA içermez. Ürün ambalajı, evsel atık olarak bertaraf edilmeye uygundur. Böylece atık maliyetinizi azaltır ve çevreye zarar veren kimyasal bir atık açığa çıkarmaz.

YIKAYICI DEZENFEKTÖR SOLÜSYONLARI

	Ürün	Özellikler	Kullanım Alanı
Sekumatic® FR 	Cerrahi aletlerin yıkayıcı dezenfektörlerle temizliği için alkali solüsyon	Alkali pH Kalıntı bırakmadan yüksek temizlik Mükemmel malzeme uyumluluğu	Yıkayıcı dezenfektörlerde kullanımı 3-5 ml//L. Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin talimatlarına uygun programı seçiniz. Dozajlama yıkayıcı dezenfektör pompaları ile sağlanmaktadır.
Sekumatic® FRE 	Isıya hassas aksesuarlarda dahil olmak üzere tüm cerrahi aletlerin temizliği için enzim içerikli solüsyon	Enzim içerir Nötr pH Hassas malzemeler için uygun Nötralizasyon gerektirmez	Yıkayıcı dezenfektörlerde kullanımı 2-8 ml//L, aletlerin manuel ön temizliği için 5-20 ml//L önerilmektedir. Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin talimatlarına uygun programı seçiniz. Dozajlama yıkayıcı dezenfektör pompaları ile sağlanmaktadır.
Sekumatic® Proclean 	Cerrahi aletlerin, MIC aletlerinin, plastik malzemelerin yıkayıcı dezenfektörlerle temizliği için hafif alkali solüsyon	Hafif Alkali pH Anodize alüminyum da dahil yeniden kullanılabilir cerrahi aletlerin temizliği için uygundur Suyun kalitesine bağlı olarak nötralizasyon gerektirmez	Yıkayıcı dezenfektörlerde kullanımı 3-6 ml//L. Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin talimatlarına uygun programı seçiniz. Dozajlama yıkayıcı dezenfektör pompaları ile sağlanmaktadır.
Sekumatic® FNP 	Alkali temizleme sonrası sıvı nötralizasyon solüsyonu, ayrıca kirli aletlerin manuel temel temizliği için asidik solüsyon	Fosforik asit içerir Yüzey aktif madde içermez Renkli metaller, anodize alüminyum ve kaplama aletler için uygun değildir	Yıkayıcı dezenfektörlerde kullanımı 1-2 ml//L, aletlerin manuel temel temizliği için 5-10 % konsantrasyonda kullanımı önerilmektedir. Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin talimatlarına uygun programı seçiniz. Dozajlama yıkayıcı dezenfektör pompaları ile sağlanmaktadır.
Sekumatic® FNZ 	Alkali temizleme sonrası sıvı nötralizasyon solüsyonu	Sitrik asit içerir Yüzey aktif madde içermez Geniş materyal uyumluluğu	Yıkayıcı dezenfektörlerde kullanımı 1-2 ml//L. Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin talimatlarına uygun programı seçiniz. Dozajlama yıkayıcı dezenfektör pompaları ile sağlanmaktadır.
Sekumatic® Oxivario 	Temizleme solüsyonları ile kombinasyon halinde kullanılan aktif oksijen esaslı sıvı temizleme solüsyonu	Oxivario programı olan yıkayıcı dezenfektörlerde sadece Sekumatic FR ile kullanımı uygundur	Yıkayıcı dezenfektörlerde ikinci temizlik aşamasında 3-8 mL//L. Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin talimatlarına uygun programı seçiniz. Dozajlama yıkayıcı dezenfektör pompaları ile sağlanmaktadır.
Sekumatic FD 	Yıkayıcı dezenfektörlerde kemotermal dezenfeksiyon aşamasında kullanılan dezenfektan solüsyon	Gluteraldehid içerir Geniş etkinlik spektrumu: Bakterisidal, fungusidal, virüsidal Yüksek malzeme uyumluluğu Nötr pH	Yıkayıcı dezenfektörlerde kemotermal dezenfeksiyon aşamasında 10 mL//L 55-60 C derecede 5 dakikalık yıkama önerilmektedir. Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin talimatlarına uygun programı seçiniz. Dozajlama yıkayıcı dezenfektör pompaları ile sağlanmaktadır.